

# Абразо-Софт Акрил

## Руководство по применению

Перед употреблением просим внимательно прочитать данное руководство.

### 1. Область применения

Абразо-Софт Акрил применяется для предварительной полировки всех пластмасс в зубопротезной практике.

### 2. Работа

Обычным способом подготовить поверхность к полированию. Обработать Абразо-Софт Акрил с помощью мотора со скоростью 3000 R·мин.<sup>-1</sup>. Круговыми движениями полировать пластмассовую поверхность полировочной пастой и Дентаклин Бимс-средством для дезинфекции полировочного порошка (Кат.№ 520 0099 8) или Бимштайн-полировочной пастой (Кат.№ 520 0016 0) до исчезновения шероховатости и неровности. Для получения эффекта высокого глянца очистить протез и отполировать пушком для пластмассы (Кат.№ 350 0082 0) и пастой Абразо-Стар К50 (Кат.№ 520 0016 1).

При полировании в моторе никогда не задерживаться в одном месте, т.к. создаётся тепло, что может привести к горению пластмассы.

### 3. Прочее

Сведения данного руководства постоянно обновляются по мере появления новых данных и опыта. Поэтому, перед использованием новой упаковки, рекомендуем Вам каждый раз знакомиться с руководством по применению. Данное руководство предназначено для Абразо-Софт Акрил Кат.№ № 350 0102 0 и 350 0080 0.