

Руководство по применению Акрилик Сеп Acrylic Sep® bredent

Прежде, чем использовать продукцию, пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции в целях правильного использования продукции

1. Показания к применению

Акрилик Сеп (Acrylic Sep) – это жидкость для разделения гипса/пластмассы. Жидкость содержит альгинаты и не содержит силикон, что обеспечивает отличное разделение и позволяет гарантировать безопасный процесс впрыскивания и изготовления штампов.

2. Процесс обработки

Для применения жидкости налейте небольшое ее количество в плотно закрывающуюся емкость и нанесите жидкость из этой емкости на поверхность гипса с помощью чистой кисти. Таким образом, исключается загрязнение жидкости в основной емкости хранения. Для достижения максимального эффекта разделения необходимо удалить остатки воска с поверхности гипса. Если остатки воска не будут сняты с поверхности гипса, то это приведет к образованию кристаллов, которые испортят поверхность зубных протезов.

Смачивайте жидкостью Акрилик Сеп теплую поверхность гипса (температура приблизительно 50° С), используя для этого мягкую кисть. Избегайте образования лужиц, жидкость должна быть распределена по поверхности равномерно. Излишки разделительной жидкости уберите чистой кистью. Достаточно нанести один слой разделительной жидкости.

3. Хранение

Акрилик Сеп хранится при комнатной температуре. После использования бутылку следует плотно закрывать.

4. Рекомендации по безопасности и предупреждению риска

Акрилик Сеп раздражает глаза и кожу. В случае попадания жидкости на кожу, ее следует смыть большим количеством воды. При попадании жидкости в глаза, промойте глаза большим количеством чистой воды. Храните жидкость в недоступном для детей месте.

5. Дополнительная информация

Информация, на которой основаны данные инструкции использования, постоянно обновляется в соответствии с новыми сведениями и опытом работы. Поэтому мы рекомендуем снова читать эти инструкции каждый раз, открывая новую упаковку. Данные инструкции относятся к жидкости Акрилик Сеп (Acrylic Sep, кат. номер № 520 0029 1).



ООО «Денталдепо ЛОТ»

г. Воронеж, ул. Красноармейская, д.60. Тел./факс 8 4732 77-64-77, 71-49-54.

www.dentald.ru

info@dentald.ru