

Дентаклин очиститель протезов

1000 мл Кат.№ 520 0099 2

Руководство по применению

Концентрат для очистки протезов с целью устранения налётов, отложений зубного камня

Приготовление готового к применению раствора: Взяв ёмкость из стекла или кислотостойкой пластмассы, развести концентрат в воде в соотношении 1 : 10. Поскольку очиститель протезов является кислотой - в ёмкость сначала наливают воду, затем добавляют концентрат и аккуратно перемешивают не разбрызгивая.

Внимание: Всегда работать в защитных очках!

Применение: Подогреть готовый к использованию раствор в стеклянном стакане в ультразвуковой ванне до 50-70 °С. Загрязнённый протез быстро промыть в воде, затем с помощью пластмассового пинцета поместить в очистительный раствор, 10-15 мин. облучить ультразвуком, вынуть пинцетом, тщательно промыть в проточной воде, удалив при этом щёткой остатки.

Хранение:

Хранить очиститель протезов (концентрат и готовый к применению раствор) только в хорошо запираемых, кислотостойких официально разрешённых для этого ёмкостях.

Утилизация данного материала: Концентрат и его использованная упаковочная ёмкость требуют особой утилизации. Для их уничтожения См. технический паспорт безопасности, Глава 13. Бывший в употреблении раствор можно слить в канализацию, используя при этом большое количество проточной воды.

Просим соблюдать данные технического паспорта безопасности и нижеуказанные меры предосторожности!

- | | |
|-------------------|--|
| R 34: | Вызывает ожоги |
| R 36/37/38: | Раздражает глаза, органы дыхания и кожу |
| S 1/2: | Хранить в запираемых помещениях и в недоступных для детей местах |
| S 26: | При попадании в глаза незамедлительно промыть водой и обратиться к врачу |
| S 36/37/39: | Работать в защитной одежде, защитных перчатках и очках/защитной повязке для лица |
| Агрессивная среда | Содержит фосфорную кислоту |