

## **Дентаклин растворитель гипса Speed**

(1000 мл) Кат.№ 520 0101 0

**Готовый к применению раствор для удаления остатков гипса  
Разводится в воде в соотношении 1 : 1 или макс. 1 : 2**

**Внимание: Всегда работать в защитных очках!**

**Применение:** Влить растворитель гипса в открытую термостойкую ёмкость из пластмассы или стекла, вложить в неё загрязнённые предметы и держать их там до растворения гипсовых загрязнений.

Легкий подогрев и ультразвуковое воздействие ускоряют очищающее действие.

**Предметы из алюминия не корродируют.  
Позаботьтесь о хорошей вентиляции рабочего места!**

**Хранение:** при температуре от 0° до 25° С.

**Утилизация:** по мере ослабления очищающей способности бывший в употреблении растворитель гипса можно слить в канализацию.

№ освидетельствования Федерального ведомства по охране окружающей среды: 24 09 0007

Просим соблюдать следующие меры предосторожности и требования паспорта безопасности:

S 2: Держать в недоступном для детей месте

S 26: При соприкосновении с глазами незамедлительно промыть водой и показаться врачу