

Дентаклин Бимс

средство для дезинфекции полировочного порошка

1000 мл

Кат.№ 520 0099 9

Руководство по применению

Готовый к применению раствор для замешивания и дезинфекции полировочного порошка

Обладает бактерицидным /противогрибковым/противовирусным (Гепатит В, ВИЧ) действием.

Применение: Замешать полировочный порошок **только** на Дентаклин Бимс средстве для дезинфекции полировочного порошка, исходя из требуемой консистенции.

Консистенция в замешанном виде сохраняется приблизительно от двух до трёх недель. Бактерицидные свойства за этот период не утрачиваются. Возможно дополнительное подмешивание полировочного порошка и дезинфицирующего средства Дентаклин Бимс в любом количестве. Полная замена раствора полировочного порошка должна производиться не реже одного раза в три недели. После полирования замешанный материал смыть обычным способом. Упаковочную ёмкость тщательно закрывать, а перед употреблением хорошо встряхивать.

Хранение: при комнатной температуре.

Утилизация: Использованный материал утилизировать вместе с бытовым мусором. Остаток жидкости можно вылить в канализационный слив.

Информация о данном материале постоянно обновляется по мере появления новых данных и опыта. Поэтому, перед использованием новой упаковки, рекомендуем Вам каждый раз знакомиться с такой информацией.