

Дентаклин средство для дезинфекции слепков и протезов

Bredent Кт. № 520 0100 6

Руководство по применению

Концентрат для дезинфекции слепков (силикон, альгинат, гидроколлоид, полиэфир) и протезов.

Не содержит альдегид, спирт и фенол

Обладает бактерицидным /противогрибковым/противовирусным (Гепатит В, ВИЧ) действием.

Применение: Налить готовый к применению раствор в пластмассовую или стеклянную ёмкость, быстро сполоснуть слепок/протез под струёй проточной воды и поместить его в ёмкость. Загрязнённые протезы предварительно очистить Дентаклин средством для очистки. Через 1 минуту вынуть и снова промыть под струёй проточной воды, при необходимости обдуть сжатым воздухом.

Приготовление готового к применению раствора: Развести концентрат в воде в соотношении 1 : 9.

Доставка в кабинет: Слегка наполнить пакет Дентаклин средством, встряхнуть и вылить. Затем вложить влажный фрагмент протеза в пакет и запечатать.

Внимание: Перед примеркой дезинфицированный протез тщательно промыть.

Важно: Дентаклин средство для дезинфекции слепков и протезов нельзя смешивать с другими средствами для очистки и дезинфекции. Бывший в употреблении раствор можно вылить в канализационный слив.

Просим соблюдать следующие меры предосторожности и требования паспорта безопасности!

- R 36: Раздражает глаза и кожу
- S 26: При соприкосновении с глазами незамедлительно промыть водой и показаться врачу
- S 28: При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды с мылом
- S 37/39: Использовать защитные перчатки и очки/защитную повязку для лица
- XI: Раздражающее действие
Содержит: четверичные соединения аммония