

Экзакто-Форм

bredent

Информация о продукте

Пластмасса для изготовления моделей Экзакто-Форм
Двухкомпонентный материал для изготовления моделей на полиуретановом базисе (PU) для моделирования зубов высокой точности. Консистенция, обеспечивающая нанесение очень тонким слоем, позволит легко и без образования пор выполнять отливку Ваших слепков. Точное воспроизведение поверхности в соответствии с оригиналом и абсолютная стабильность формы, а также не имеющая себе равных высокая точность посадки без какого-либо расширения – отличительная черта этой, требующей меньших затрат пластмассы.

Форма поставки

Пластмасса для изготовления моделей Экзакто-Форм поставляется в банках каждая по 50 гр

Компонент А + В.

В одной единице упаковки – 6 банок компонента А 50 гр и 6 банок компонента В 50 гр.

Указание по работе – Применение I

Обязательно соблюдать меры предосторожности!

Перед тем, как открыть банки, хорошо встряхнуть содержимое. Рывком открыть крышки обоих компонентов.

Каждый раз перед использованием тщательно промешать осевшие компоненты А + В до получения однородной жидкости.

Вылить содержимое банки компонента В в банку компонента А (соотношение компонентов смеси 1 : 1).

Хорошо замешать оба компонента в течение 30 сек.

Рабочее время 2-3 минуты

Схватывание после 30 минут

Макс. полное отверждение 1,5 часа.

Поскольку речь здесь идет о двухкомпонентном материале для изготовления моделей на полиуретановом базисе, миновать преждевременное реагирование компонента В при открывании банки (поступление влажности воздуха) невозможно, иными словами, чтобы избежать продолжительного проникновения влажности из воздуха, а тем самым и преждевременного отверждения компонента В, Вам необходимо немедленно пустить материал в работу.

№ для заказа 520 0028 0

Важно!

При работе с некоторыми силиконовыми слепками (Импрегум и т.д.) перед заливкой необходимо нанести микродисперсную Изолирующую жидкость Экзакто – Форм, равно как и для изолирования материала Экзакто -Форма и при автополимеризации.

Изолирующая жидкость Экзакто – Форм = 125 мл аэрозольный баллончик

№ для заказа: 520 0021 0

Хранение: - Важно -

В помещениях с поддерживаемым температурным режимом и в ненарушенных вязках – 6 месяцев (См. минимальный срок годности на упаковочной коробке/этикетке. По истечении минимального срока годности возврату и рекламации не подлежит. Возврат поставок оригинальных упаковок возможен только в течение 8 дней с момента отсчета.

Официальный представитель фирмы Аладент/Бредент по ЦЧР, г. Воронеж
Компания «РЕАЛДЕНТ» Тел./факс (4732) 77-64-77, 71-49-54.

E-mail: realdent@mail.ru

(например, 27 = день, 07 = месяц, 87 = год, 07 = контроль – минимальный срок годности).

Указание по работе – Применение II

При потребности в небольшом количестве (менее 100 гр) пластмассы для изготовления моделей

Экзакто –Форм можно все содержимое банок компонента А + В по отдельности залить в шприцы (См. Принадлежности) и выбирать из них нужное количество в соотношении компонентов смеси 1:1, сливая в емкости для замешивания.

В течение 30 сек. оба компонента тщательно замешивают.

Рабочее время 2-3 минуты

Схватывание после 30 минут

Макс. полное отверждение 1,5 часа.

Внимание: Оставшийся в шприцах материал обязательно пустить в работу в течение 2 дней!

Перед тем, как открыть коробки, хорошо встряхнуть содержимое. Рывком открыть крышки у обоих компонентов.

Каждый раз перед использованием тщательно промешивать осевшие до получения однородной жидкости.

Оба компонента можно приобрести и в отдельности.

Компонент А

Банка 50 гр № для заказа: 520 0017 4

Компонент В

Банка 50 гр № для заказа 520 0017 3

Принадлежности:

Емкость для замешивания 120 мл

72 диаметр, 41 мм высота

100 шт. в упаковке № для заказа: 390 0030 0

Палочки для замешивания круглые деревянные

250 мм длина

100 шт. в упаковке № для заказа: 390 0031 0

Шприцы для дозированного заполнения 20 мл

50 шт. в упаковке № для заказа: 390 0036 0

Меры предосторожности:

Наличие соответствующей защитной одежды, перчаток, очков, защиты для лица

При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды и мыла!

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и

проконсультироваться с врачом

Не вдыхать пары – обеспечить достаточную вентиляцию!

При несчастном случае или недомогании немедленно обратиться к врачу (при возможности показать этикетку)

Не допускать попадания в руки детей!

Не спускать в канализацию, воды, в почву!

Избегать открытого огня!

Официальный представитель фирмы Аладент/Бредент по ЦЧР, г. Воронеж
Компания «РЕАЛДЕНТ» Тел./факс (4732) 77-64-77, 71-49-54.

E-mail: realdent@mail.ru