

# Креппманжета

bredent

Руководство по применению

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

## 1. Область применения

Креппманжета превосходно подходит для пакования цоколя бюгельного протеза. Она допускает любой индивидуальный размер муфеля, а волнистая структура позволяет значительно увеличить поверхность муфеля. Увеличенная поверхность муфеля благоприятствует равномерному поглощению тепла в печи, а в дальнейшем - контролируемому, распределяемому на большей поверхности, более быстрому охлаждению муфеля. Креппманжета дает экономию паковочной массы.

## 2. Работа

Вытянуть креппманжету нужной длины из упаковки и отрезать.

Внимание:

На клейкой ленте не должно быть грязи.

Клейкой лентой приклеить креппманжету вокруг цоколя модели с паковочной массой и соответствующим количеством паковочной массы - например Бревент (каталожный № 570 0002 и 570 00R2 0) - при незначительной частоте колебаний вибратора выполнить пакование цоколя. Выключить вибратор и более им не пользоваться.

После того, как паковочная масса схватилась, удалите креппманжету. Донышко муфеля обработать согласно руководству фирмы-производителя паковочной массы и отправить муфель в печь.

## 3. Прочее

Сведения данного руководства постоянно обновляются по мере появления новых данных и опыта. Поэтому, перед использованием новой упаковки, рекомендуем каждый раз прочитывать руководство по применению.

Данное руководство предназначено для креппманжеты.

Каталожный № 570 0002 1.