

Дентапласт КФО

bredent

Руководство по применению

Перед употреблением просим внимательно прочитать данное руководство.

1. Область применения

Пластмасса Дентапласт КФО – это мономер-/полимерная пластмасса, наносимая распылением, предназначенная для аппаратур ортодонтии. Высокая устойчивость материала Дентапласт КФО позволяет экономить время и обеспечивать при этом высокую точность выполняемых работ.

2. Работа

2.1 Подготовка обрабатываемой детали:

Нанести на модель традиционный изолянт от пластмассы согласно предписанию изготовителя. Мы рекомендуем воспользоваться Изопластом фирмы Бредент (Кат.№ 540 0101 9). При использовании других изолянтов предварительно необходимо проверить их на совместимость с материалом Дентапласт КФО. Закрепить кламмеры и аппаратуры обычным способом, например клейким воском.

2.2 Непосредственно работа

Нанести пластмассу-порошок из ёмкости для порошка Бредент (Кат.№ 390 0038 0) максимально толщиной в четыре миллиметра непосредственно на модель. Порошок при этом не вдыхать! (См. пункт 3.1). Затем обильно смочить порошок жидкостью из ёмкости для жидкости Бредент (Кат.№ 390 0039 0). Высокая степень прозрачности материала позволяет своевременно выявлять образование пор. Их можно удалить путём накалывания отверстий скальпелем.

2.3 Полимеризация

Не позднее пяти минут с момента начала нанесения, Дентапласт КФО помещают в автоклав. Полимеризация выполняется в водяной бане при температуре 50°C и давлении от 2 до 3 бар в течение 20 минут.

3. Меры предосторожности

3.1 Защитная одежда:

При работе с материалом Дентапласт КФО необходимы защитные очки, маска от пыли и защитная одежда.

3.2 Жидкость воспламеняема: никогда ею не пользоваться в непосредственной близости от открытого огня.

3.3 При попадании жидкости Дентапласт КФО на кожу незамедлительно промыть большим количеством воды. В случае аллергических реакций на Дентапласт КФО (покраснение кожи, боль, затруднение дыхания и т.п.) немедленно обращайтесь к врачу. При попадании жидкости Дентапласт КФО на слизистую оболочку или в глаза, сразу прополоскать в большом количестве воды и обратиться к врачу.

3.4 Просим требовать паспорт безопасности Евросоюза для надежной работы с материалом Дентапласт КФО.

4. Срок годности и хранение:

4.1 Дентапласт КФО хранить в сухом состоянии и защищённом от света месте при комнатной температуре. Указанный на ёмкости срок годности гарантируется при хранении с соблюдением вышеуказанных условий.

4.2 Материал не употребляется после истечения указанного на упаковке срока годности.

4.3 Утилизация:

Просим соблюдать условия технического паспорта.

5. Прочее

Сведения данного руководства постоянно обновляются по мере появления новых данных и опыта. Поэтому, перед использованием новой упаковки, рекомендуем Вам каждый раз читать руководство по применению. Данное руководство предназначено для пластмассы Дентапласт КФО (Кат.№ 540 0018 3, 540 0018 4, 540 0018 5, 540 0018 6, 540 0018 7, 540 0018 8).