

КОМПОНЕНТЫ & АКСЕССУАРЫ



PRECI-SAGIX ПАТРИЦА P

Отливаемая сферическая пластиковая матрица. Отливается из твердого дентального сплава.

Уменьшенный \varnothing 1,7:

1321 6 шт. # 1321B 50 шт.

Стандартный \varnothing 2,2:

1371 6 шт. # 1371B 50 шт.



PRECI-SAGIX ПАТРИЦА M

Матрица из сплава NOPRAX** для техники литья недорогими сплавами.

Уменьшенный \varnothing 1,7:

1322 2 шт. # 1322B 20 шт.

Стандартный \varnothing 2,2:

1372 2 шт. # 1372B 20 шт.



PRECI-SAGIX ПАТРИЦА V

Стандартная матрица из сплава NOPRAX** \varnothing 2,2 мм с резьбой M2 и внутренним пазом 0,9 мм. Используйте отвертку IMP-XS-042.

1373 1 шт.



PRECI-SAGIX БАЗОВОЕ КОЛЬЦО

Для техники литья из сплава IRAX* (при работе с драгоценными сплавами) или NOPRAX** (при работе с недорогими сплавами). M2 резьба для # 1373 стандартной матрицы \varnothing 2,2 мм

RA 0063 сплав IRAX* 1 шт.

RA 0064 сплав NOPRAX** 1 шт.



PRECI-SAGIX ДЕРЖАТЕЛЬ ПАТРИЦ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРА

Универсальный держатель для матриц PRECI-SAGIX

1300 P для \varnothing 1,7 и 2,2 1 шт.



PRECI-SAGIX ОТВЕРТКА ДЛЯ ВКРУЧИВАЮЩИХСЯ ПАТРИЦ

Общая длина: 26 мм – Внешний паз: 0,9 мм

IMP-XS-042 1 шт.



CEKA BOND

Анаэробный адгезив, который предотвращает выкручивание матрицы. Матрицу можно выкрутить, используя отвертку IMP-XS-042.

CB1 5 ml



PRECI-SAGIX ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Универсальный инструмент для установки матриц PRECI-SAGIX

1323 для \varnothing 1,7 и 2,2 1 шт.



PLASTICWAX 8° ПРОФИЛИ

Высота: 4,5 мм – Длина: 60 мм

Ширина у верхушки: 1,9 мм / у основания: 2,8 мм

IMP-CK-014 4 шт.



PRECI-SAGIX АНАЛОГ

Модельный аналог матрицы

1331 для \varnothing 1,7 2 шт.

1381 для \varnothing 2,2 2 шт.

* Сплав IRAX 1400-1460 °C - для техники литья только драгоценными сплавами. Au 60 - Pt 24 - Pd 15 - Ir 1

** Сплав NOPRAX 1355-1450 °C - для техники литья только недорогими сплавами. Ni 72 - Cr 17 - Fe 10 - Mn 1

WWW.CEKA-PRECI-LINE.COM

SWISS MADE



CEKA
ATTACHMENTS
PRECI-LINE

CEKA REVAX
CEKA SOL
PRECI-HORIX
PRECI-VERTIX
PRECI-VERTIX AT
PRECI-BAR
PRECI-BALL
PRECI-CLIP
PRECI-SAGIX
PRECI-CLIX AXIAL
PRECI-CLIX EXTRACORONAL
PRECI-CLIX RADICULAR
PRECI-CLIX RADICULAR RC
PRECI-TUBIX/MORTIX
PRECI-POST
PRECI-PROFILE
PERMA-RET
3C-BOND
EXPANDO
CEKA-MAX

PRECI-SAGIX

PRECI-SAGIX



Проспект № 287.R-ed.A
Copyright© ALPHADENT NV 1/2010
BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk

ARSEUS DENTAL
SERVING THE DENTAL PROFESSIONALS

www.dentald.ru

ALPHADENT NV
Textielstraat 24
8790 Waregem, Belgium
tel +32 56 629 100
fax +32 56 629 101

e-mail: info@ceka-preciline.com

PRECI-SAGIX

САГИТТАЛЬНЫЙ ШАРИКОВЫЙ АТТАЧМЕН С СЕГМЕНТИРОВАННОЙ МАТРИЦЕЙ ДЛЯ ЧАСТИЧНЫХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ И ИМПЛАНТОВ



- ✓ Запатентованный защелкивающийся механизм
- ✓ Невысокая цена
- ✓ Широкое применение
- ✓ Простая замена частей
- ✓ Выбор рабочей процедуры
- ✓ Длительная ретенция



1а. Отливаемая пластиковая матрица. Определите оптимальный путь введения. Установите отливаемую пластиковую матрицу (# 1321 или # 1371) в восковую репродукцию протеза, используя держатель для параллелометра (# 1300 P). Рекомендуется укрепление с лингвальной стороны для частичных съемных протезов. Отлейте из твердого стоматологического сплава.



1b. Литая металлическая матрица. Определите оптимальный путь введения. Установите матрицу из сплава NOPRAX** (# 1322 или # 1372) в восковую репродукцию, используя держатель для параллелометра (# 1300 P). Рекомендуется укрепление с лингвальной стороны для частичных съемных протезов. Отлейте из недрагоценного стоматологического сплава.



1с. Вкручивающаяся матрица. Определите оптимальный путь введения. Установите вкручивающуюся матрицу (# 1373, стандартный размер 2,2 мм) в базовое кольцо из сплава IRAX* (# RA 0063 – при литье из драгоценных сплавов) или NOPRAX** (# RA 0064 – при литье из неблагородных сплавов). Используйте отвертку (# IMP-XS-042). Установите в восковую репродукцию, используя держатель для параллелометра (# 1300 P). Выкрутите матрицу. Используйте двухэтапную технику паковки и проведите литье. Балочные профили PLASTICWAX (# IMP-СК-014) также доступны.



2а. Установка матрицы. Всегда используйте розовую дублирующую матрицу для изготовления огнеупорной модели! Поместите розовые дублирующие матрицы на матрицах и проверьте их параллельность. Блокируйте поднутрения, произведите дублирование и отливку из огнеупорного материала.



Отлейте каркас. Обработайте его без повреждения ретенционного выступа в полости для матрицы. Отполируйте до зеркального блеска. Установите розовую рабочую матрицу (# 1316 или # 1366) с помощью ключа (# 1323) в каркас для дальнейшей работы с пластмассой.



Замена рабочей матрицы
Для замены матрицы, используйте остроконечный инструмент для перемещения и удаления. Используйте ключ (# 1323) для установки новой матрицы.
Доступны 3 уровня ретенции:
желтый: нормальная ретенция
белый: сниженная ретенция
красный: повышенная ретенция

НАБОРЫ



PRECI-SAGIX СТАРТОВЫЙ НАБОР P
Стартовый набор с пластиковыми матрицами, необходимыми инструментами и матрицами с различными уровнями ретенции. Матрица отливается из любого твердого стоматологического сплава.
Набор из 22 элементов:
2+2 отливаемые пластиковые матрицы
2+2 желтые матрицы (нормальная ретенция)
2+2 белые матрицы (сниженная ретенция)
2+2 красные матрицы (повышенная ретенция)
2+2 дублирующие/рабочие матрицы
1 универсальный держатель для параллелометра
1 универсальный инструмент для установки
Набор с отливаемыми матрицами: # 1301



PRECI-SAGIX СТАРТОВЫЙ НАБОР M
Стартовый набор с литыми матрицами из сплава NOPRAX**, необходимыми инструментами и матрицами с различными уровнями ретенции в 2-х размерах: Уменьшенный 1.7 и Стандартный 2.2. Для литья из недрагоценных сплавов.
Набор из 22 элементов:
2+2 литые матрицы из сплава NOPRAX**
2+2 желтые матрицы (нормальная ретенция)
2+2 белые матрицы (сниженная ретенция)
2+2 красные матрицы (повышенная ретенция)
2+2 дублирующие/рабочие матрицы
1 универсальный держатель для параллелометра
1 универсальный инструмент для установки
Набор с литыми матрицами: # 1303

PRECI-SAGIX МАТРИЦЫ



PRECI-SAGIX МАТРИЦА – ИЗ ПОЛИАЦЕТАЛЯ
Уменьшенный ø 1,7: высота 3,1 мм – ø 3,1 мм
Желтые – нормальная ретенция:
1311 6 шт. # 1311B 50 шт.
Белые – сниженная ретенция:
1312 6 шт. # 1312B 50 шт.
Красные – повышенная ретенция:
1313 6 шт. # 1313B 50 шт.
Комбинированная упаковка:
1314 2 + 2 + 2 шт.

Стандартный ø 2,2: высота 4,1 мм – ø 4,2 мм
Желтые – нормальная ретенция:
1361 6 шт. # 1361B 50 шт.
Белые – сниженная ретенция:
1362 6 шт. # 1362B 50 шт.
Красные – повышенная ретенция:
1363 6 шт. # 1363B 50 шт.
Комбинированная упаковка:
1364 2 + 2 + 2 шт.

PRECI-SAGIX ДУБЛИРУЮЩАЯ / РАБОЧАЯ МАТРИЦА
Уменьшенный ø 1,7:
1316 6 шт. # 1316B 50 шт.
Стандартный ø 2,2:
1366 6 шт. # 1366B 50 шт.