

VILLACRYL OPAKER



Акриловый материал, предназначенный к улучшению соединения акрил-металл а также маскировки металлических элементов зубных протезов.

Достоинства:

- легкий в подготовке и обработке
- прямой и эффективный способ упрочнения
- не содержат тяжелых металлов
- эффективно поправляет соединение акрил-металл в зубных протезах
- эффективно маскирует металлические элементы в зубных протезах
- возможность индивидуального отбора цвета

Назначение:

- скелетные протезы
- мостовидные протезы облицованные акрилом

Способ употребления:

Очистить поверхность металла от остатков поковочной массы, а также окисей металлов при помощи пескоструйного аппарата. Очищенную поверхность металла подготовить пескоструйной обработкой окидом алюминия зернистостью 250 микрон под давлением 4 бара. Подготовленную поверхность обезжирить ацетоном, нанести Opaker Primer и равномерно развести его при помощи сжатого воздуха (это не может быть масляный компрессор). В отдельный сосуд налить несколько капель мономера Opaker Liquid и добавить порошок Opaker Powder до насыщения. Мешать около 30 секунд до получения однородной консистенции. Порошки Opaker Powder можно мешать друг с другом для получения желательного цвета. Поверхность металла покрыть равномерным слоем подготовленного препарата и выждать около 5 минут.

Полимеризация: Покрашенный металлический элемент поместить в полимеризаторе в воде температурой 95°С на 10 минут под давлением 2 бара. Упрочнение (обжиг) покрывного материала можно получить в стерилизаторе, жарким воздухом (250°С за 2 минуты) или в потоке жаркого воздуха над пламенем горелки. Слой препарата нельзя сжигать. В противоположном случае он прокорродировывает и не удержит основного материала. Правильно упрочненный препарат твердый, сохраняет постоянный цвет, удерживается на металле и тщательно его покрывает.

Меры предосторожности:

Хранить в отдалении от источников воспламенения и излучения.

Во время работы с материалом не кушать и не курить.

Возможность раздражения глаз, дыхательной системы и кожи. В случае контакта препарата с глазами промыть их водой и обратиться к врачу. Не вдыхать испарений. Работать в хорошо вентилированном помещении. Места контакта кожи с препаратом тщательно промыть водой и мылом. В случае нечаянного потребления обратиться к врачу.

Вредный для среды. Не выливать мономера в канализацию.

Условия хранения:

-Хранить в темном и хорошо вентилированном помещении температурой 5-25°С в месте недоступным для детей.

- Не употреблять продукта после истечения срока годности

Zhermapol Sp. z o.o.** имеет установленную полную Систему Обеспечения Качества сертифицированную на соответствие с ISO 9001/ISO 13485 через нотифицированную единицу **0120 SGS United Kingdom Ltd, Systems and Services Certification.

Изделие получило знак CE соответствия с директивой 93/42/EEC.

Другие акриловые препараты:

Villacryl H Plus для базисов протезов

Villacryl H Rapid для базисов протезов

Villacryl S для починок протезов

Villacryl IT для индивидуальных слепочных ложек

Villacryl STC Kit для временных корон и мостов

Villacryl SP для акриловых частей бюгельных протезов

Villacryl Soft для мягких подкладок протезов

Villacryl Hard для твёрдых подкладок протезов

Villacryl Ortho для ортодонтических аппаратов

Villacryl Ortho Mix для ортодонтических аппаратов

Form Plast моделирующая пластмасса выгорающая беззольно