

VILLACRYL STC



Villacryl STC это полиметакрилатный материал для холодной полимеризации предназначенный для изготовления временных корон, починок корон и мостов облицованных акрилом. Соответствует международному стандарту ISO 10477 тип II.

Преимущества:

- эстетическая расцветка
- короткое время самополимеризации
- низкая температура самополимеризации – нет опасности местного перегрева ткани
- высокая твёрдость применяемый в стоматологическом кабинете как и в лаборатории не содержит тяжёлых металлов

Предназначение:

- временные коронки и починки коронок, облицованных акрилом

Расцветка:

- три цветовые оттенки, соответствующие основным цветом зубов фирмы VITA

Способ употребления:

1. Дозировка

Смешать тщательно 2г порошка на 1г (1мл) жидкости и влить в приготовленную стандартную форму или в слепок снятый перед шлифованием зуба. Время смешивания не должно быть больше чем 1минута. Ошлифованные зубы изолировать вазелином.

2. Полимеризация

Форму поместить на 4 минуты во рту. После отвердения снять корону, удалить излишество материала и поместить в горячей воде при температуре 70°C - 80°C на 5-10 минут используя препарат Отвердитель (0,5мерки ~2г. на стакан воды ~200мл.)

3. Обработка

Изготовленную корону отполировать при помощи **Полировочной пасты** фирмы **Zhermapol** и поместить во рту пациента. Корону осаждать при помощи временного цемента, например Provident.

Меры предосторожности:

- Содержит диметакрилат гексонодиола –температура возгорания +150°C. Хранить в дали от источников огня и излучения.
- Во время работы с препаратом не кушать и не курить.

- Возможность раздражения глаз, органов дыхания и кожи. В случае контакта препарата с глазами промыть их водой и связаться с врачом. Избегать вдыхания пара мономера.
- Работать в хорошо вентилируемом помещении. Место контакта кожи с препаратом тщательно мыть мылом и водой. В случае случайного съедения вызвать врача.
- Вредный для среды. Не выливать мономера в канализацию

Условия хранения:

- Хранить в тёмном и хорошо вентилируемом помещении при температуре 5-25°C в месте недоступном для детей.
- Не использовать препарат по истечении срока годности.

Упаковка:

Основная торговая упаковка содержит 3*20 г порошка и 40 мл жидкости, пипетка для жидкости.

Сосуд для смешивания препарата.

Внимание!

Письменные и словесные инструкции и информации, переданные во время демонстрации проведенной производителем вытекают из настоящего уровня стоматологической техники и технологии. Надо их принимать как обязывающие информации. Информация, полученная от других лиц (по причине разного уровня их полномочий) не освобождают потребителя от личной проверки, подходит ли препарат к определённому назначению. Поскольку применение препарата проходит без возможности контроля со стороны производителя, это ограничивает ответственность изготовителя до стоимости поставленного товара.

Другие акриловые препараты:

Villacryl H Plus - для базисов протезов

Villacryl H Rapid – для базисов протезов для быстрой полимеризации

Villacryl S – для починок протезов

Villacryl SP – для акриловых частей бюгельных протезов

Villacryl IT – для индивидуальных слепочных ложек

Villacryl STC Hot – для постоянных коронок и мостов

Villacryl Soft – для мягких подкладок протезов

Villacryl Hard – для твёрдых подкладок протезов

Villacryl Ortho – для ортодонтических аппаратов

Villacryl Ortho Mix– для ортодонтических аппаратов