

Дентаклин растворитель гипса bredent

1000 мл	Кат.№ 520 0011 9
2500 мл	Кат.№ 520 0099 3

Готовый к применению раствор для удаления остатков гипса

Внимание: Всегда работать в защитных очках!

Применение: Влить растворитель гипса в открытую термостойкую ёмкость из пластмассы или стекла, вложить в неё загрязнённые предметы и держать их там до растворения гипсовых загрязнений.
Легкий подогрев и ультразвуковое воздействие ускоряют очищающее действие.

Предметы из алюминия не корродируют.

Хранение: при температуре от 0° до 25° С.

Утилизация: по мере ослабления очищающей способности бывший в употреблении растворитель гипса можно слить в канализацию.

№ освидетельствования Федерального ведомства по охране окружающей среды: 24 09 0006

Просим соблюдать следующие меры предосторожности и требования паспорта безопасности:

S 2:	Держать в недоступном для детей месте
S 26:	При соприкосновении с глазами незамедлительно промыть водой и показаться врачу